



Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
F +31 23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Cavex ImpreSafe - protocol voor desinfectie

Desinfectans - doodt bacteriën, schimmels en virussen - voor het desinfecteren van alginaat- en siliconenafdrukken

Mengverhouding: 30 ml desinfectans op 1 liter water
Contacttijd: 3 minuten



1 Knip de fles in en vul de maatcup tot 30 ml.



5 Laat de afdruk in de vloeistof zakken. Drie minuten laten inwerken; gebruik de timer.



2 Schenk eerst water (zie TIP1) in de container tot aan het aangegeven merkteken (circa 1 liter).



6 Haal het rekje na 3 minuten uit het desinfectans.



3 Schenk desinfectans in de container.



7 Afspoelen met water.



4 Plaats de afdruk op het rekje in de container.



8 Schud het overtollige water van de afdruk en doe deze in een plastic zakje. Sluit het zakje luchtdicht af. Noteer "gedesinfecteerd" op het zakje.

TIP1: Vul de container altijd eerst met water, gevolgd door het desinfectans. Zo voorkomt u schuimvorming.

TIP2: Ververs de vloeistof elke week, of zodra deze er vervuild uitziet.

CAVEX FOR DENTAL USE ONLY