



**CAVEX**

Cavex alginate en accessoires worden geleverd door uw dental depot.

Voor nadere informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 - Dental Customer Service, of [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)

Cavex Holland BV  
Harmenjansweg 19  
P.O. Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands  
T +31 23 530 77 00  
F +31 23 535 64 82  
[dental@cavex.nl](mailto:dental@cavex.nl)  
[www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)

## Van pasta naar afdruk

### Stap D

Vul de lepel met de alginaatpasta, geef in de volle lepel de occlusie aan met een bevochtigde vinger.


### Stap E

De tandarts plaatst de lepel in de mond, laat de pasta uitharden en trekt de lepel met één snelle en soepele beweging weer uit de mond van de patiënt.

### Stap F

Lepel met afdruk afspoelen onder koud water en overtollig water afslaan. De afdruk desinfecteren. Daarna opnieuw afspoelen en op de hand afslaan.

En dan de laatste stap, naar het lab. Doe de lepel met de nog vochtige afdruk in een plastic zakje, zonder toevoeging van water, natte watten of andere bevochtigers. Sluit het zakje luchtdicht af, zodat de luchtvochtigheid behouden blijft.

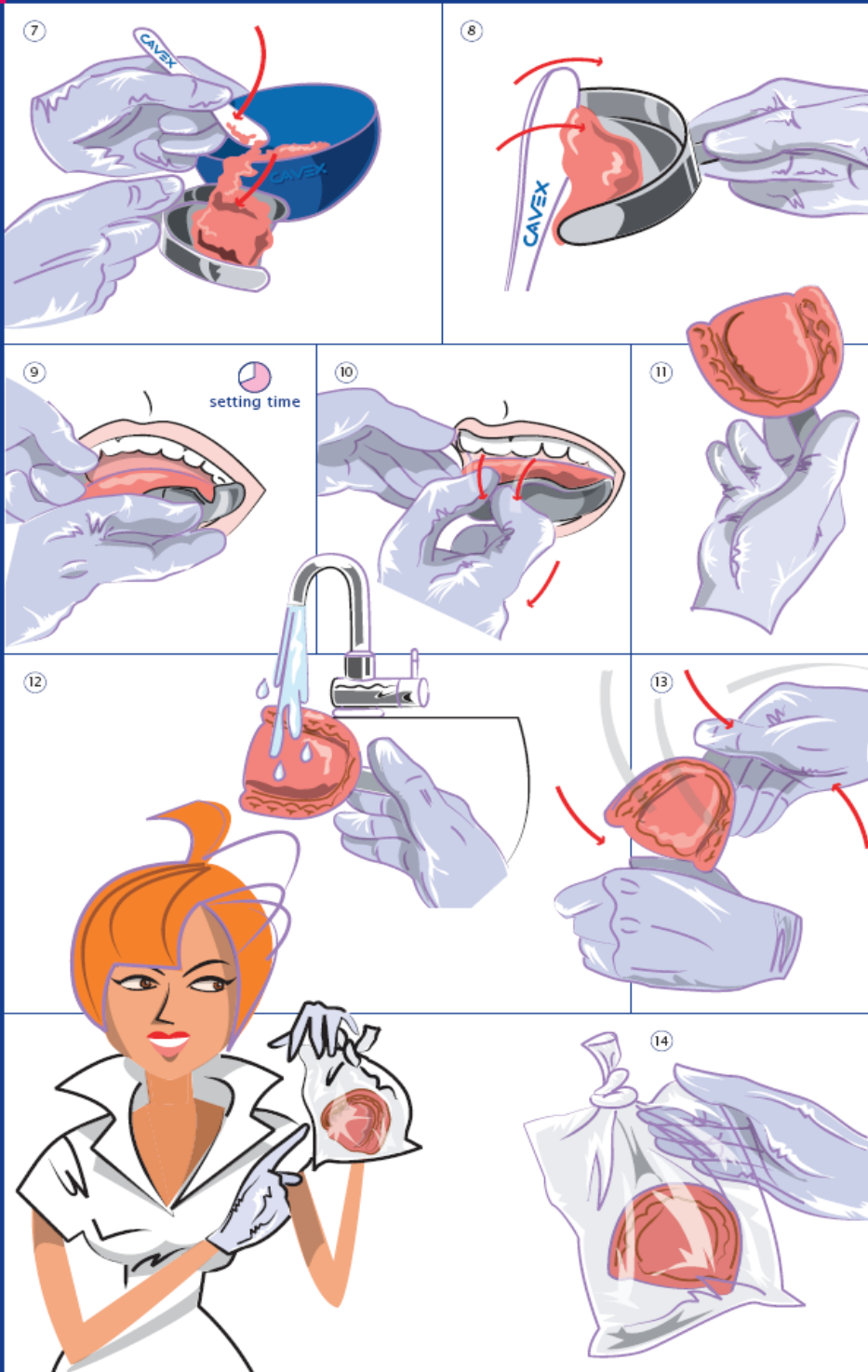

**CAVEXFOR DENTAL USE ONLY**